



# たよレール SOTOE


**スマホでデモ機**

アプリ不要。スマホの画面内で、実際に手すりを配置した様子をバーチャルに確認できます。

## たよレールSOTOEとわたレールEKの連結について

**※たよレールSOTOEスリムは、スリム型のみ組み合わせでは使用できません。**

下記の **×** が付いている組合せで連結しないでください。  
安定性が無くなり転倒の恐れがあります。

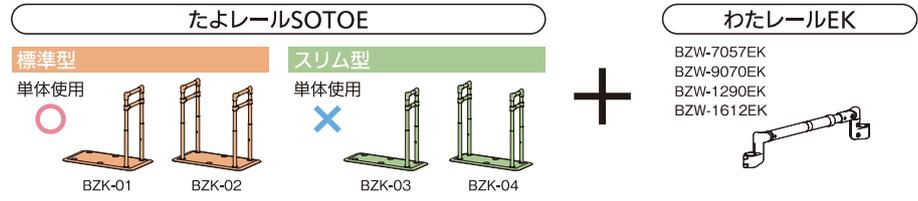

### 平坦部での連結条件

●連結しているうち、最低1台は標準型を使用する(スリム型のみで連結しない)。

○ 標準型のみ連結 (※必ずベースプレートの上を歩く。中央使い)

○ 標準型+スリム型

× スリム型のみ連結

× 動線がベースプレートの上にごない

●左記の条件をクリアしていれば段差部でも取付け可能です。

---

●スリム型とわたレールで「曲がり角」を作らない。

× 上から見たところ 角度がついている

※1: 標準型手すりとわたレールの連結には角度をつけられます。ただし、手すりの角度は90°以上にします。

ただし以下の条件を満たす場合のみ、スリム型とわたレールで「曲がり角」を作ってもよい。

①3台以上の両手すりを連結する場合 ※2

②3台以上の片手すりで連結し、スリム型が中間にくる場合 ※2

※2: 90°以上あれば角度がついてもよい。

●左記の条件をクリアしていれば何台でも連結可能です。

○ (Multiple diagrams showing various connection scenarios)


× スリム型のみ連結

## わたレールEKで連結した場合の格差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、取付け角度は0~45°の間で自由に調節できます。下の表は目安としてください。

例) 3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて使用する場合、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

A 手すり長さ	570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm	
B 伸縮部の長さ	426mm	556mm	756mm	1056mm	1456mm	
C 対応段差高さ (最大は取付け角度が45°のとき)	0~301mm	0~393mm	0~534mm	0~746mm	0~1029mm	
D ベースプレート間の距離※	角度0°	420mm	550mm	750mm	1050mm	1450mm
	角度45°	295mm	387mm	528mm	740mm	1023mm
E わたレールEKの対応範囲	BZW-7057EK	BZW-9070EK	BZW-1290EK	BZW-1612EK		
	570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm	

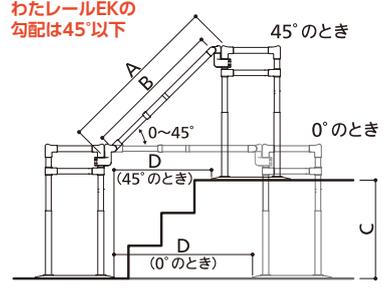

※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。



マツホシ株式会社



BZK-01 (片手すり)  
01265-000248

BZK-02 (両手すり)  
01265-000251



# たよレール SOTOE

わたレールEK連結使用例




オプション わたレールEK 伸縮タイプ



手すり部:φ30、φ36  
BZW-7057EK:伸縮範囲:57~70cm  
BZW-9070EK:伸縮範囲:70~90cm  
BZW-1290EK:伸縮範囲:90~120cm  
BZW-1612EK:伸縮範囲:120~160cm **NEW**

「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。
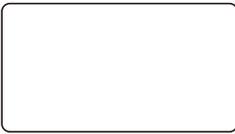
<p>たよレールSOTOE 片手すり・標準型 + わたレールEK (1台)</p>  <p>BZK-01S-7057 BZK-01S-9070 BZK-01S-1290</p> <p>01265-000250</p> 	<p>たよレールSOTOE 両手すり・標準型 + わたレールEK (2台)</p>  <p>BZK-02S-7057 BZK-02S-9070 BZK-02S-1290</p> <p>01265-000252</p> 	<p>たよレールSOTOE 片手すり・標準型 + わたレールEK (1台) + たよレールSOTOE 片手すり・標準型</p>  <p>BZK-01W-7057 BZK-01W-9070 BZK-01W-1290</p> <p>01265-000249</p> 	<p>たよレールSOTOE 両手すり・標準型 + わたレールEK (2台) + たよレールSOTOE 両手すり・標準型</p>  <p>BZK-02W-7057 BZK-02W-9070 BZK-02W-1290</p> <p>01265-000253</p> 
<p>たよレールSOTOE 片手すり・標準型 + わたレールEK (2台)</p>  <p>BZK-01SW-7057 BZK-01SW-9070 BZK-01SW-1290</p> <p>01265-000256</p> 	<p>たよレールSOTOE 両手すり・標準型 + わたレールEK (1台)</p>  <p>BZK-02S1-7057 BZK-02S1-9070 BZK-02S1-1290</p> <p>01265-000263</p> 	<p>たよレールSOTOE 両手すり・標準型 + わたレールEK (4台)</p>  <p>BZK-02SW-7057 BZK-02SW-9070 BZK-02SW-1290</p> <p>01265-000257</p> 	<p>たよレールSOTOE 片手すり・スリム型 + わたレールEK (1台)</p>  <p>BZK-03S-7057 BZK-03S-9070 BZK-03S-1290</p> <p>01265-000260</p> 
<p>たよレールSOTOE 両手すり・スリム型 + わたレールEK (1台)</p>  <p>BZK-04S1-7057 BZK-04S1-9070 BZK-04S1-1290</p> <p>01265-000264</p> 	<p>たよレールSOTOE 両手すり・スリム型 + わたレールEK (2台)</p>  <p>BZK-04S-7057 BZK-04S-9070 BZK-04S-1290</p> <p>01265-000262</p> 	<p>たよレールSOTOE 片手すり・標準型 + わたレールEK (1台) + たよレールSOTOE 片手すり・スリム型</p>  <p>BZK-0103W-7057 BZK-0103W-9070 BZK-0103W-1290</p> <p>01265-000265</p> 	<p>たよレールSOTOE 両手すり・標準型 + わたレールEK (2台) + たよレールSOTOE 両手すり・スリム型</p>  <p>BZK-0204W-7057 BZK-0204W-9070 BZK-0204W-1290</p> <p>01265-000266</p> 

手すり

「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。

わたレールEK BZW-1612EK 組み合わせ



たよレールSOTOE  
片手すり・標準型  
+  
わたレールEK (1台)



01265-000304 BZK-01S-1612



たよレールSOTOE  
両手すり・標準型  
+  
わたレールEK (2台)




01265-000306 BZK-02S-1612



たよレールSOTOE  
片手すり・標準型  
+  
わたレールEK (1台)  
+  
たよレールSOTOE  
片手すり・標準型




01265-000310 BZK-01W-1612

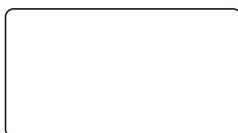

たよレールSOTOE  
両手すり・標準型  
+  
わたレールEK (2台)  
+  
たよレールSOTOE  
両手すり・標準型




01265-000311 BZK-02W-1612

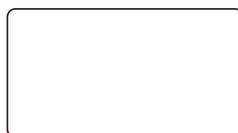

たよレールSOTOE  
両手すり・標準型  
+  
わたレールEK (1台)




01265-000305 BZK-02S1-1612

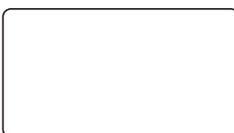

たよレールSOTOE  
片手すり・スリム型  
+  
わたレールEK (1台)




01265-000307 BZK-03S-1612

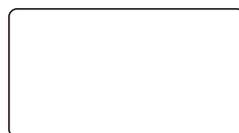

たよレールSOTOE  
両手すり・スリム型  
+  
わたレールEK (1台)



01265-000308 BZK-04S1-1612

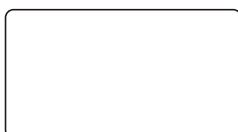

たよレールSOTOE  
両手すり・スリム型  
+  
わたレールEK (2台)



01265-000309 BZK-04S-1612



たよレールSOTOE  
片手すり・標準型  
+  
わたレールEK (1台)  
+  
たよレールSOTOE  
片手すり・スリム型



01265-000312 BZK-0103W-1612



たよレールSOTOE  
両手すり・標準型  
+  
わたレールEK (2台)  
+  
たよレールSOTOE  
両手すり・スリム型



01265-000313 BZK-0204W-1612




洋式トイレ用  
スライド手すり

幅65×奥46×高58~74cm  
肘掛け高  
58~74cm (2cmピッチ9段階)



幅26cm~40cmのトイレ対応

PN-L53001  
00980-000191

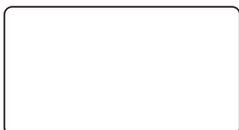

洋式トイレ用フレーム  
S-はねあげR-2



幅66×奥55×高55~70cm  
高さ 6段階調節  
55・58・61・64・67・70cm

幅14cm~40cmのトイレ対応

木製ひじかけ  
533-087  
00221-000450




洋式トイレ用ベストサポート手すり



幅62~72cm  
(左右5cmずつ無段階調節)  
×奥行46×高56~71cm  
(3cm毎6段階調節)

627-010  
01235-000008

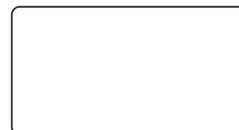




抗ウイルス加工で  
清潔安心の外パイプ  
抗菌ウイルス加工剤：有機合成系・練込  
パイプ被膜部



## 基本セット T型ベース・丸型ベース・丸型ベース耐水

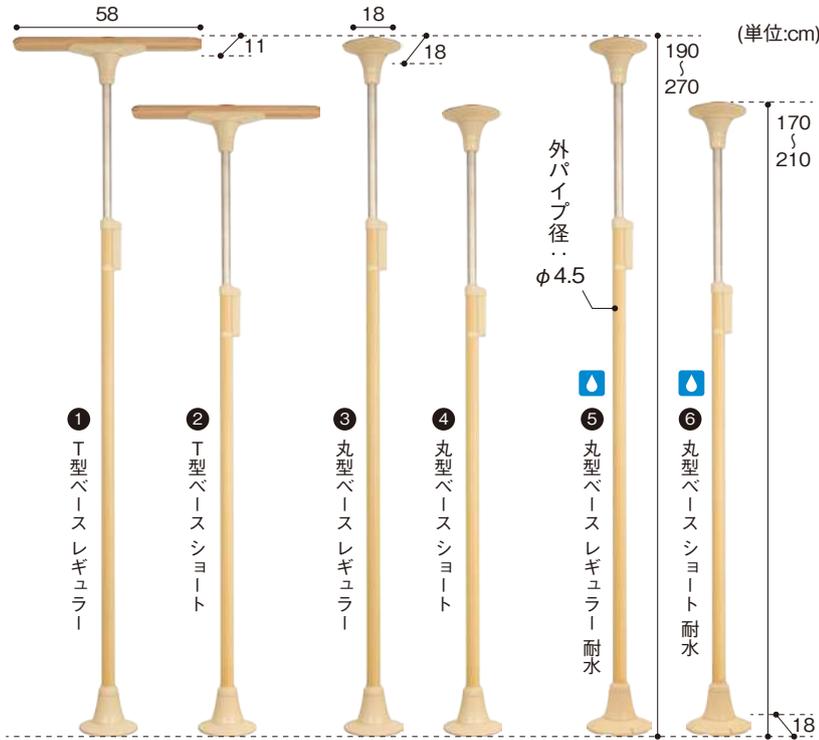

<b>① T型ベース レギュラー</b> BPZ-100-50 00254-000416	<b>② T型ベース ショート</b> BPZ-100-60 00254-000418
<b>③ 丸型ベース レギュラー</b> BPZ-100-10 00254-000410	<b>④ 丸型ベース ショート</b> BPZ-100-20 00254-000412
<b>⑤ 丸型ベース レギュラー 耐水</b> BPZ-100-80 00254-000422	<b>⑥ 丸型ベース ショート 耐水</b> BPZ-100-81 00254-000423




T型の天井ベースは、プレート  
をズラして設置することが  
可能です。




**耐水対応** ベランダや玄関ポーチ等雨に濡れるような場所にも対応している商品です。**浴室**では使用できません。

### 最小限の圧力で突っ張り、容易に設置。さらに安心機能を追加しました。

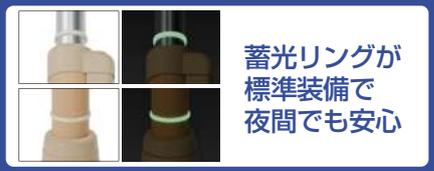


### ツイン手すり W+D

ウェーブ型手すりロングとD型手すりを  
角度90°・135°・180°に組替え可能  
移乗、立ち上がり、移動に対応

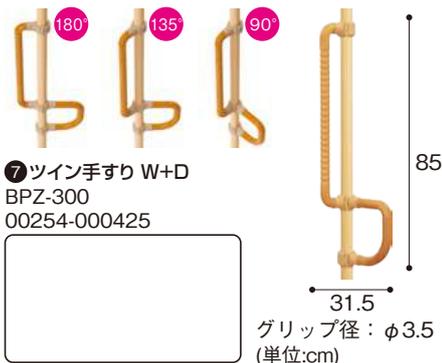


### ツイン手すり W+W

ウェーブ型手すりロング2本を  
角度90°・135°・180°に組替え可能  
移乗、立ち上がり、移動に対応

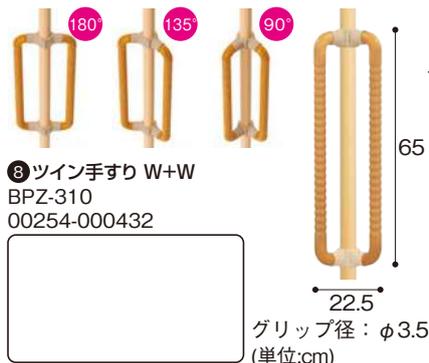

### プッシュ手すり

縦・横に組替え、位置ずらしが可能。  
手のひらや前腕部、寄り掛かりなどの  
面受けに対応

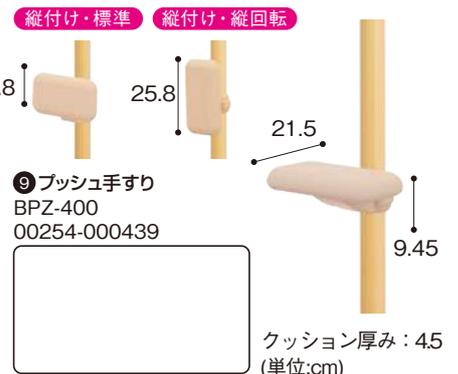

手すり


### b型手すり ロング

立ち上がりの重心移動を誘導  
立位姿勢保持も上部でサポート

⑩b型手すりロング  
BPE-300-100  
00254-000368



グリップ径：φ3.5 (単位:cm)

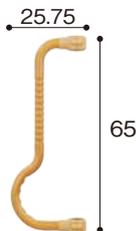


### D型手すり

引っ張り+プッシュアップ  
立ち座りや姿勢保持に最適

⑪D型手すり  
BPE-300-110  
00254-000369



グリップ径：φ3.5 (単位:cm)

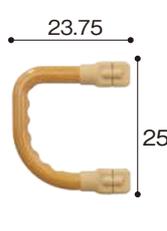

### 円型手すり

移乗方向に制約がかからず方向転換補助に適した手すりです。

⑫円型手すり  
BPE-300-20  
00254-000131



グリップ径：φ3.5 (単位:cm)




### ウェーブ型手すり ロング

立ち上がりや段差昇降などの動作や  
移動をサポートできます。

⑬ウェーブ型手すり ロング  
BPE-300-40  
00254-000133



グリップ径：φ3.5 (単位:cm)

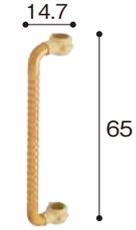


### グリップアーム 5P

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。

⑭グリップアーム 5P  
BPE-300-60  
00254-000143



グリップ径：φ3.5 (単位:cm)

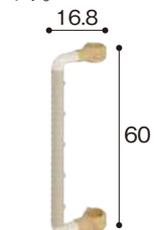


### 玄関アーム レギュラー

段差のあるところで使えるようになる  
出幅のコンパクトな手すりです。

⑮玄関アーム レギュラー  
BPE-500-10  
00254-000360



付属 (丸グリップ・シリコン滑り止めシート)

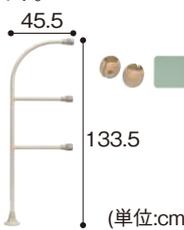

### システム伸縮手すり 固定セット

角度が90°・135°・180°に組替え可能  
移乗、立ち上がり、移動に対応

⑯ 600~900 伸縮範囲：30



芯々：60~90

⑰ 900~1200 伸縮範囲：30



芯々：90~120

手すり径：φ3.4、φ4.0 (単位:cm)

### システム伸縮手すり 曲げセット

両側のブラケットの角度(縦横可)を変えること  
で、手すりに傾斜を付けます。

⑱ 600~900 伸縮範囲：30



芯々：70~100

⑲ 900~1200 伸縮範囲：30



芯々：100~130

手すり径：φ3.4、φ4.0 (単位:cm)

### システム木手すり 跳ね上げセット

出入口やクローゼット等の前では、跳ね上げて  
動線を確保することができます。

⑳ 600



芯々：70

㉑ 900



芯々：100

手すり径：φ3.5 (単位:cm) 付属 (手すりホルダー)

㉒ 1200



芯々：130

⑯システム伸縮手すり  
固定セット600~900  
SBR-30-609  
00254-000169



⑰システム伸縮手すり  
曲げセット600~900  
SBR-40-609  
00254-000171



⑳システム木手すり  
跳ね上げセット600  
SBR-70-060  
00254-000115



㉑システム木手すり  
跳ね上げセット900  
SBR-70-090  
00254-000064



㉒システム木手すり  
跳ね上げセット1200  
SBR-70-120  
00254-000119



⑰システム伸縮手すり  
固定セット900~1200  
SBR-30-912  
00254-000170




⑲システム伸縮手すり  
曲げセット900~1200  
SBR-40-912  
00254-000172




#### システム手すりは

組合せることで  
自由に拡張できます  
伸縮手すりの  
固定セット+曲げセット  
を組み合わせ例

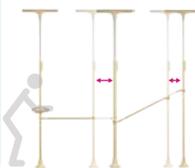

#### 跳ね上げ手すりは

ご家族の生活動線  
そのまま保てます  
手すりの開閉によって  
生活動線を保つことが  
できます。

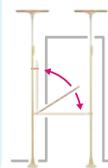



## バディー 突っ張ることによってしっかりと固定できる垂直型手すり (工事不要)



(新)  
対応天井高さ 1.9~2.8m  
収納サイズ 1.81m  
グリップ直径 3.65cm  
重量 5.7kg (丸形の場合)  
~7.1kg

(旧)  
対応天井高さ 2.1~3.2m  
収納サイズ 2.0m  
手すり部 直径 3.65cm  
重量 6.4kg (小型丸形の場合)  
~7.5kg

※基本ボールのサイズです。



 <p>設置場所に制限がない場合に <b>十字型ストッパー</b></p>	 <p>壁際に設置する場合に ※梁のある場所に設置してください <b>I型ストッパー</b></p>	 <p>トイレなど狭い場所に設置する場合に ※梁のある場所に設置してください <b>丸型ストッパー</b></p>
 <p>壁(端)にぴったり付けたい場合に最適 ■天井側 ※梁のある場所に設置してください ■床側 <b>I型ストッパー2ヶ</b> 壁と手すりの距離 約4cm</p>	 <p>部屋の角(隅)にぴったり付けたい ■天井側 ※梁のある場所に設置してください ■床側 <b>コーナーストッパー</b> 壁と手すりの距離 約4cm</p>	



浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。


00054-000054

バディー ノーマルタイプ十字型  
MNTCM  
バディー ノーマルタイプ I 型  
MNTCMIS  
バディー ノーマルタイプ丸型  
MNTCMRCS

バディー(コーナーストッパー仕様)  
MNTCMCRS  
00054-000467  
バディー(I型ストッパー2ヶ仕様)  
MNTCMISW  
00054-000468

### クロスバー

歩行動作をサポート。複数本の連結も可能。

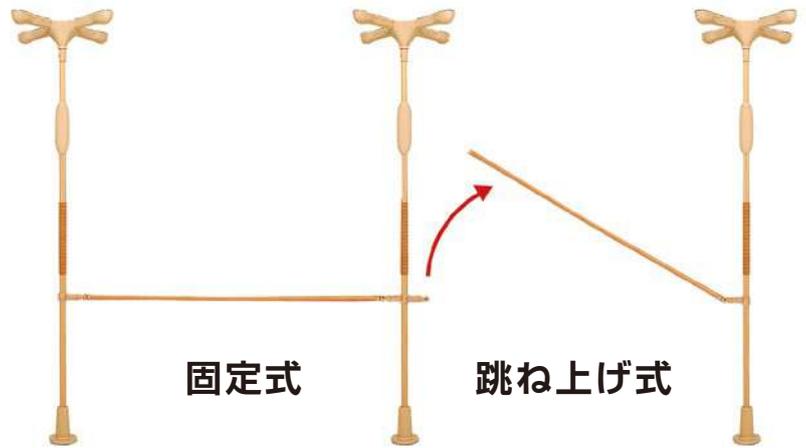

固定式

跳ね上げ式

固定式(40cmタイプ)  
MNTCM03BE004  
00054-000337

固定式(60cmタイプ)  
MNTCM03BE006  
00054-000338

跳ね上げ式(90cmタイプ)  
MNTCM02BE009  
00054-000333

### サイドバー

立ち座りや寝返り動作をサポート。



MNTCM01LB  
00054-000055

跳ね上げ式(1.2mタイプ)  
MNTCM02BE012  
00054-000334

跳ね上げ式(1.6mタイプ)  
MNTCM02BE016  
00054-000335

跳ね上げ式(2.0mタイプ)  
MNTCM02BE020  
00054-000336

ルーツ サイドタイプ/センタータイプ/コーナータイプ/ロングタイプ/スモールタイプ(両手すり)



サイドタイプ  
21.6kg

サイドタイプ MNTPLBR  
00054-000116




**特長** 安定感に優れた、シンプル形状の床置き型手すり。  
手すり内側の空間は、頭が入らない安全寸法です。



センタータイプ  
12.9kg

センタータイプ MNTPSBR  
00054-000117

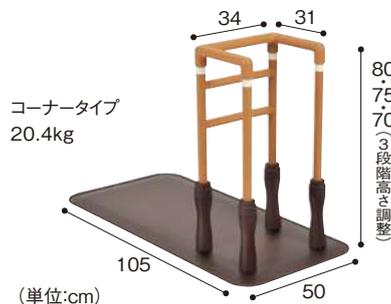

コーナータイプ  
20.4kg

コーナータイプ MNTPCRBR  
00054-000132



ルーツ同士を連結できるようになりました。



ロングタイプ + クロスバー + センタータイプ

連結する場合は、  
【クロスバー取り付けブラケット】を  
使用してください。



**警告** 下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど  
安全上の理由から使用できません。



ルーツ センタータイプが複数設置される場合  
【ルーツ センタータイプ+クロスバー+ルーツ センタータイプ】



バディーだけでなく、ルーツも  
クロスバーに連結できるようになりました。

**警告** 下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど  
安全上の理由から使用できません。

中央にルーツ センタータイプが設置される場合  
【バディー+クロスバー+ルーツセンタータイプ+  
クロスバー+ ルーツ ロングタイプ】

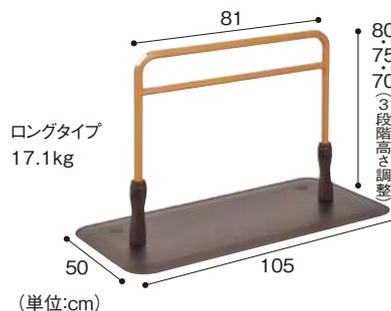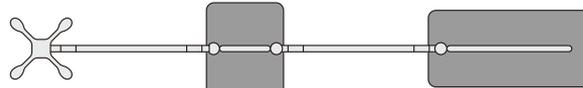

ロングタイプ  
17.1kg

ロングタイプ MNTPLGBR  
00054-000133



スモールタイプ  
(両手すり)  
14.0kg

スモールタイプ(両手すり) MNTPT2  
00054-000217





# よかレール **NEW**

膝、腰に負担をかけない  
立ち上がり動作をお手伝いします。

13kg

33.5  
86  
82  
78  
74  
70 (5段階高さ調整)  
62  
52

センタータイプ マット付  
PJ01-ASM1  
00631-000726

(単位:cm)

17kg

33.5  
86  
82  
78  
74  
70 (5段階高さ調整)  
92  
52

サイドタイプ マット付  
PJ01-ALM1  
00631-000727

17.5kg

77  
86  
82  
78  
74  
70 (5段階高さ調整)  
52  
92

ロングタイプ マット付  
PJ01-BLM1  
00631-000728

13kg

33.5  
86  
82  
78  
74  
70 (5段階高さ調整)  
62  
52

コーナータイプ マット付  
PJ01-CSM1  
00631-000730

## よかレールストッパー

0.7kg

119  
111

PJ01-T1  
00631-000758

## よかオモシ

5kg

125  
100

PJ01W-5Z  
00631-000764



## たちあっぷⅡ CKA-24

重量:18.4kg  
(単位:cm)

46.2  
85  
80  
75  
70 (4段階高さ調整)  
66  
66

00055-000207



## スタンディ

22.5kg

85  
82  
79  
76  
73  
70 (6段階高さ調整)  
50  
35  
63  
78

折りたたみ可能

PN-L80401  
00980-000315



## BS小路

**NEW**



15.6kg


36  
90  
85  
80 (3段階高さ調整)  
37  
62

推奨段差0~15cm  
最大調整範囲26cm

01235-000250

### オプション

BS小路 ステップ台  
重量 10kg  
高さ調節3段階 (10・12.5・15cm)

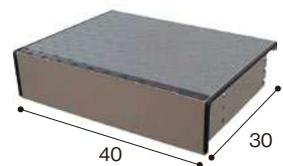

01235-000279

手すり


# yazaki たちあっぷ540

矢崎化工株式会社

握りやすい  
ディンプル(くぼみ)形状



CKH-01 (両手すり)  
重量:34.7kg  
00055-000127

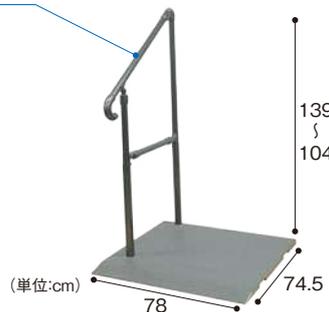

CKH-02 (片手すり)  
重量:28.6kg  
00055-000128

**オプション**

たちあっぷ540  
専用ステップ台

※ステップ台 CKH-BH は、必ず CKH-BL と組み合わせてベースに取り付けてください。

ステップ台CKH-BHは、最低高さでも240mmとなり、安全な昇降が困難になります。CKH-BHを1台のみでは使用しないでください。



重量 6.0kg  
高さ調整4段階  
(9・11・13・15cm)



重量 9.6kg  
高さ調整4段階  
(21・25・29・33cm)

# yazaki あがりかまち用 たちあっぷ・たちあっぷ ミニ

矢崎化工株式会社



CKE-01-1 (両手すり)  
00055-000109  
CKE-01 (両手すりステップ台付)  
00055-000105



CKE-02-1 (片手すり)  
00055-000110  
CKE-02 (片手すりステップ台付)  
00055-000106



CKG-03 (両手すり)  
00055-000125



CKG-04 (片手すり)  
00055-000126

**オプション**

かまちステップ台  
CKE-B



重量 6.9kg  
高さ調節4段階  
(12・14・16・18cm)


# マツ六株式会社 たよレールdan BZD-01,03



アプリ不要。スマホの画面内で、実際に手すりを配置した様子をバーチャルに確認できます。



BZD-01 (片手すり)  
01265-000075

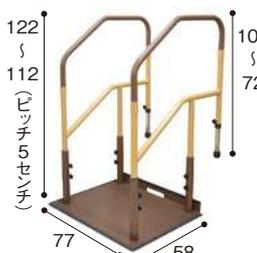

BZD-03 (両手すり)  
01265-000077

**オプション**

たよレールdan踏み台  
BZD-F200  
01265-000182  
重量 8.5kg



高さ調節4段階  
(12・15・17.5・20cm)

BZD-02 (片手すり踏み台付)  
01265-000076

BZD-04 (両手すり踏み台付)  
01265-000078